

Sichere und wirksame Behandlungen



Genehmigung von J. Petersen

Feuermale - Vor und nach 3 Behandlungen



Genehmigung von Dr. Simón

Teleangiektasien im Gesicht - Vor und nach 3 Behandlungen



Genehmigung von J. Petersen

Kirschangiom - Vor und nach 1 Behandlung



Genehmigung von Pia Frosslund

Spinnennävus - Vor und nach 1 Behandlung



Genehmigung von J. Petersen

Periokulares Gefäß - Vor und nach 5 Behandlungen



Scannen und Behandlung ansehen

Erweiterte Äderchen

KLINISCH GETESTET
SICHER UND WIRKSAM



Ellipse A/S

Agern Allé, 11 DK-2970
Hørsholm, Denmark
+45 45 76 88 08

www.ellipse.com

ellipselasers.wordpress.com
 facebook.com/Ellipse.Denmark
 youtube.com/ellipsedenmark



Dr. Daniela Küng – Alle Kassen
Fachärztin für Gynäkologie u. Geburtshilfe
6973 Höchst, Franz-Reiter-Straße 8
Telefon +43 5578 73322 Fax DW 11
E-Mail gyn@praxis-rheindelta.at

Ellipse ist ein Hersteller von Licht-basierten Lösungen für medizinische und kosmetische Behandlungen. Ellipse hat die Anerkennung von Ärzten und Kosmetikerinnen für die Qualität der Produkte und Dienstleistungen weltweit gewonnen. © Ellipse a/s. Alle Rechte vorbehalten.

1PLV8464-A01



Erweiterte I²PL & Laser
Haut - Lösungen



Sind Ihnen rote Blutgefäße lästig oder peinlich?

Vaskuläre Läsionen sind das Ergebnis zahlreicher oder großer Gefäße, die sich direkt unter der Haut bilden. Diese Läsionen treten in vielen Größen und Formen auf und man findet sie am ganzen Körper. Sie kommen in einer Vielzahl von Formen vor, einschließlich Feuermale, geplatzte Äderchen, diffuse Rötungen, Hämangiome und Kirschangiome. Vielen Menschen sind diese Läsionen, obwohl teilweise seit Geburt existent, lästig oder sogar peinlich. Dank Ellipse können Sie hier schnell und effektiv Abhilfe schaffen.

Wie funktioniert die Ellipse Behandlung?

Ellipse verwendet kurze, sichere Impulse eines intensiv gepulsten Lichts (die sogenannte 2PL-Technologie von Ellipse, oftmals aber auch nicht ganz korrekt als ein Laser bezeichnet). Das System filtert das Licht um sicherzustellen, dass die verwendeten Wellenlängen vorwiegend vom Hämoglobin in den Problemgefäßen absorbiert werden. Das Licht wandelt sich in Wärme um, die das Protein in den Zellwänden der Äderchen zerstört, so dass sie nach der Behandlung allmählich verschwinden. Um die optimale Lichtübertragung zu gewährleisten, wird vor der Behandlung eine dünne Schicht Kontaktgel auf die Haut aufgetragen (ähnlich wie bei Ultraschalluntersuchungen).

Welche Gefäße können behandelt werden?

Viele verschiedene Probleme können behandelt werden. Behandlungen sind am effizientesten bei Patienten mit heller Haut, die zum Zeitpunkt der Behandlung nicht gebräunt sind. Dann ist der Kontrast zwischen den Blutgefäßen und der Hautfarbe größer, wodurch die Behandlung einfacher wird. Jedoch sind Ellipse Einstellungen für verschiedene Hauttypen verfügbar, die auch für den Teint etwas dunklerer Hauttypen (max. bis Hauttyp IV) geeignet sind.

Die Bilder in dieser Broschüre geben Ihnen eine Vorstellung davon, was möglich ist.

Wie lange dauert eine Behandlung mit Ellipse?

Mit bereits einem Lichtblitz kann eine große Fläche behandelt werden. Die genaue, notwendige Anzahl von Lichtimpulsen hängt aber von der Größe und Anzahl der Läsionen ab. Ihr Arzt wird Sie hierzu näher informieren. Die durchschnittliche Dauer einer Behandlungssitzung beträgt ca. 10-20 Minuten.

Benötige ich spezielle Vorsichtsmaßnahmen vor und nach der Behandlung?

Es ist wichtig, Sonneneinstrahlung (Sonne, Solarium oder Selbstbräuner-Creme) vor und während der Behandlung zu vermeiden. Andernfalls wird Ihre gebräunte Haut mehr Licht absorbieren, was die Behandlung weniger effektiv und weniger komfortabel macht. Es ist auch empfehlenswert, das Rauchen in den 4 Stunden vor der Behandlung zu vermeiden. In der Regel ist keine besondere Pflege nach der Behandlung notwendig, aber Menschen mit empfindlicher Haut können von einer kalten Kompresse (kein Eis)

unmittelbar nach der Behandlung oder von einer vom Arzt verschriebenen Salbe profitieren.

Nach der Behandlung sollten Sie für 30 Tage längere oder intensive Sonneneinstrahlung vermeiden, auch wenn es keine Anzeichen für Entzündungen im behandelten Bereich gibt. Verwenden Sie Sonnenschutz (mindestens SPF 30), wenn die Sonneneinstrahlung nicht vermieden werden kann.

Wie viele Ellipse-Behandlungen sind erforderlich?

Die Anzahl der Behandlungen hängt von Lage und Anzahl der zu behandelnden Gefäße ab.

Tut die Behandlung weh?

Eine Anästhesie ist nicht erforderlich. Viele Patienten beschreiben die Behandlung als praktisch schmerzfrei, wie ein Schnellen von einem Gummiband auf die Haut, gefolgt von einem Wärmeempfinden das für einige Zeit anhält, wie z.B. nach einem Sonnenbad.

Wie kann ich sicher sein, dass die Ellipse sicher und wirksam ist?

Veröffentlichte, Klinische Studien von führenden Ärzten dokumentieren die Sicherheit und Effektivität der Ellipse-Behandlung bei vaskulären Läsionen. Diese wissenschaftlichen Dokumente können Sie gerne auf der Ellipse-Website, unter www.ellipse.com einsehen.